

Só Motorizados

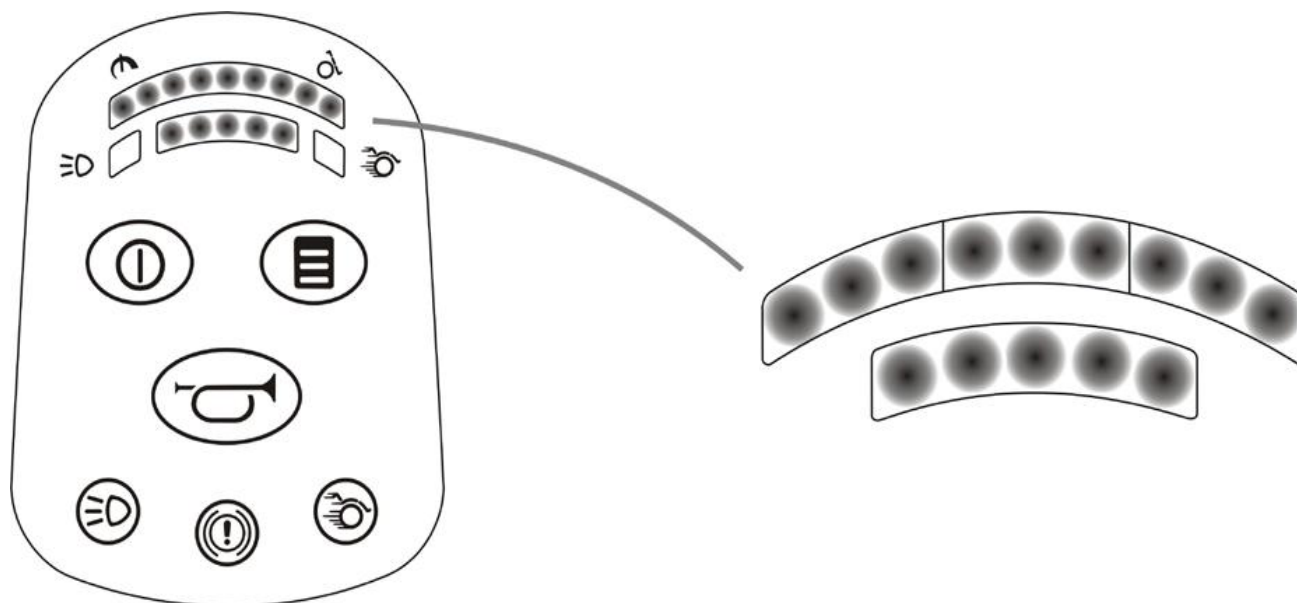


www.somotorizados.com.br

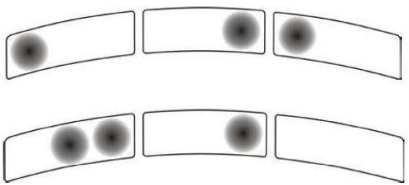
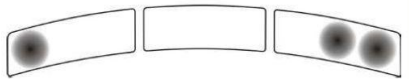
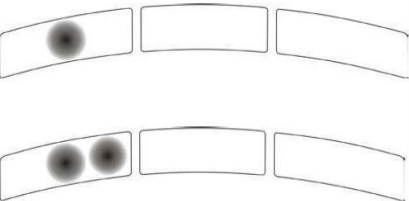
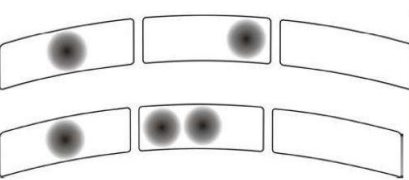
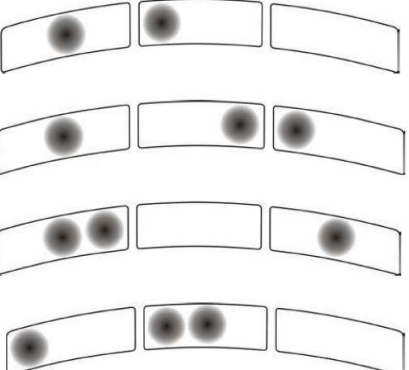
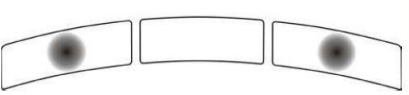
Solução de problemas Joystick Freedom

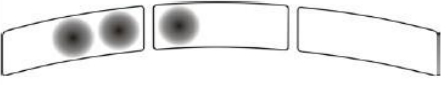
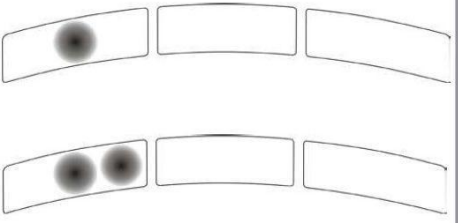
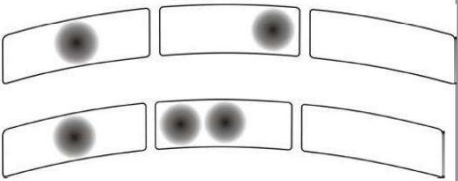
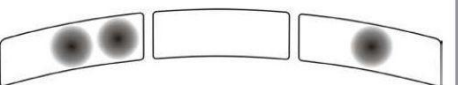
Toda vez que a cadeira de rodas motorizada apresentar alguma inconformidade, esta será identificada pelo usuário através de um código de erro. Os códigos de erro aparecem no painel do joystick, através dos leds do indicador de carga e do atenuador de velocidade.

Quando ocorre um erro, os leds do atenuador de velocidade piscam intermitentemente (Imagem 22, nº 1), enquanto os leds do indicador de carga ligam conforme o código do erro (Imagem 22, nº 2), sendo que cada erro tem uma quantidade e sequência de leds ligados específica. Na tabela abaixo, a relação dos códigos de erro.



CÓDIGO VISUAL	SINTOMA	VERIFICAR
	Voltagem abaixo do limite de segurança.	Carregar as baterias.
	Stick não está conectado.	Procure a assistência técnica para verificar conexões internas do joystick e recalibrá-lo.
	Calibração inválida.	
	Problema de conexão do stick	

CÓDIGO VISUAL	SINTOMA	VERIFICAR
	Comunicação entre o joystick e o drive foi interrompida.	Verificar conector de 4 vias que interliga o joystick ao drive da cadeira de rodas. Tentar ligar novamente.
	Cadeira foi ligada com stick fora de centro.	Solte o stick, desligue e ligue a cadeira. Verificar se o stick não está quebrado ou se não foi molhado.
	Problema no motor esquerdo.	Verifique as condições da fiação do motor esquerdo. Procure por sinais de aquecimento na fiação, conectores e motor. Tente ligar novamente.
	Problema no motor direito.	Verifique as condições da fiação do motor direito. Procure por sinais de aquecimento na fiação, conectores e no motor. Tente ligar novamente.
	Possível problema no drive de potência.	Desligue e ligue o comando, se o problema persistir, procure uma assistência técnica.
	Freio esquerdo com problema.	Verifique a fiação e as conexões do freio esquerdo, procure por sinais de mal contato, conectores frouxos, etc. Tente ligar novamente.

CÓDIGO VISUAL	SINTOMA	VERIFICAR
	Freio direito com problema.	Verifique a fiação e as conexões do freio direito, procure por sinais de mal contato, conectores frouxos, etc. Tente ligar novamente.
	Bloqueio automático da movimentação da cadeira pelo stick devido à voltagem acima do limite de segurança.	Alimentação do sistema pode estar com problema. Também pode ocorrer em descidas muito íngremes caso a cadeira atinja velocidades muito elevadas.
	Cadeira foi ligada com stick fora de centro.	Solte o stick, desligue e ligue a cadeira. Verificar se o stick não está quebrado ou se não foi molhado.
	Problema no motor esquerdo.	Verifique as condições da fiação do motor esquerdo. Procure por sinais de aquecimento na fiação, conectores e motor. Tente ligar novamente.
	Problema no motor direito.	Verifique as condições da fiação do motor direito. Procure por sinais de aquecimento na fiação, conectores e no motor. Tente ligar novamente.
   	Possível problema no drive de potência.	Desligue e ligue o comando, se o problema persistir, procure uma assistência técnica.
	Freio esquerdo com problema.	Verifique a fiação e as conexões do freio esquerdo, procure por sinais de mal contato, conectores frouxos, etc. Tente ligar novamente.